

SCHEMA DI PRELIEVO PER TUTTI I TEST **CAPILLARI**, SALIVARI, FECI, URINE E DEL CAPELLO.



NOME DEL TEST	CODICE NATRIX KIT DI PRELIEVO	CODICE FARMADATI	PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA	ORARI DI RACCOLTA	N° E TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	T° DI CONSERVAZIONE	GIORNI DI SPEDIZIONE	CODICE NATRIX KIT TRASPORTO E MODALITÀ DI SPEDIZIONE	PARAMETRI TESTATI	RIPETIZIONE DEL TEST
FOOD INTOLERANCE TEST (F.I.T.)	60900000 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE SECCO	KIT PRELIEVO: 934560311	NESSUNA	INDIFFERENTE	2 CAPILLARI SECCO (TAMPONE)	T. AMBIENTE	ENTRO 7 GG DA LUNEDÌ A VENERDÌ	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	46 ALIMENTI 92 ALIMENTI 184 ALIMENTI 92 ALIMENTI L.O.V. (LATTO-OVO-VEGETARIANI)	DOPO 6-8 MESI
GLUTEN SENSITIVITY & CELIAC TEST	60900100 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 934560323 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	IgA TOTALI; ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA/IgG; ANTI-GLIADINA IgA; ANTI GLIADINA IgG.	DOPO 6-8 MESI
IN-FLORA SCAN	61300002 KIT DI PRELIEVO FECI & URINE	KIT PRELIEVO: 970538397 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA, NON ASSUMERE LASSATIVI, ANTIDIARROICI E ANTIACIDI	FECI PRIME ORE DEL MATTINO. PRIME URINE DEL MATTINO. IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE	2 FECI, 1 URINE, 2 FECI TAMPONE (TAPPO ROSA), 1 FECI PARASSITI (TAPPO VERDE)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	ESAME MICROBIOLOGICO DELLE FECI; ESAME PARASSITOLOGICO; CALPROTECTINA; ESAME COMPLETO MACROSCOPICO, MICROSCOPICO E BIOCIMICO DELLE FECI; ELASTASI PANCREATICA; SANGUE OCCULTO; ZONULINA; INDICANO; SCATOLO. *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 4-6 MESI
PRO-FLORA CHECK	61300500 KIT DI PRELIEVO FECI TAMPONE	KIT PRELIEVO: 975040282 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA, NON ASSUMERE LASSATIVI, ANTIDIARROICI E ANTIACIDI	PRIME ORE DEL MATTINO. IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE	2 FECI TAMPONE (TAPPO ROSA)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	ESAME MICROBIOLOGICO DELLA FLORA RESIDENTE *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 4-6 MESI
DYSBIO CHECK	61300102 KIT DI PRELIEVO URINE	KIT PRELIEVO: 971013305 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA	PRIME URINE DEL MATTINO	2 URINE	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO	INDICANO; SCATOLO.	DOPO 4-6 MESI
INFLAMMATION CHECK	61300400 KIT DI PRELIEVO FECI NOCE	KIT PRELIEVO: 975023654 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA, NON ASSUMERE LASSATIVI, ANTIDIARROICI E ANTIACIDI	PRIME ORE DEL MATTINO. IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE	2 FECI	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	CALPROTECTINA	DOPO 4-6 MESI

NOME DEL TEST	CODICE NATRIX KIT DI PRELIEVO	CODICE FARMADATI	PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA	ORARI DI RACCOLTA	N° E TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	T° DI CONSERVAZIONE	GIORNI DI SPEDIZIONE	CODICE NATRIX KIT TRASPORTO E MODALITÀ DI SPEDIZIONE	PARAMETRI TESTATI	RIPETIZIONE DEL TEST
PERMEABILITY CHECK	61300400 KIT DI PRELIEVO FECI NOCE	KIT PRELIEVO: 975023654 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA, NON ASSUMERE LASSATIVI, ANTIDIARROICI E ANTIACIDI	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 FECI	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	ZONULINA	DOPO 4-6 MESI
DIGESTION CHECK	61300400 KIT DI PRELIEVO FECI NOCE	KIT PRELIEVO: 975023654 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA, NON ASSUMERE LASSATIVI, ANTIDIARROICI E ANTIACIDI	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 FECI	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	ESAME COMPLETO MACROSCOPICO, MICROSCOPICO E BIOCHIMICO DELLE FECI; ELASTASI PANCREATICA; SANGUE OCCULTO.	DOPO 4-6 MESI
PARASITOLOGY CHECK	61300002 KIT DI PRELIEVO FECI & URINE	KIT PRELIEVO: 970538397 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA, NON ASSUMERE LASSATIVI, ANTIDIARROICI E ANTIACIDI	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	1 FECI PARASSITI (TAPPO VERDE)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	ESAME PARASSITOLOGICO	DOPO 4-6 MESI
PATHOFLORA CHECK	61300500 KIT DI PRELIEVO FECI TAMPONE	KIT PRELIEVO: 975040282 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 7 GIORNI DALL'ULTIMA TERAPIA ANTIBIOTICA, NON ASSUMERE LASSATIVI, ANTIDIARROICI E ANTIACIDI	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 FECI TAMPONE (TAPPO ROSA)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	CAMPYLOBACTER SPP; SHIGELLA SPP; SALMONELLA SPP; CLOSTRIDIUM DIFFICILE; YERSINIA ENTEROCOLITICA.	DOPO 4-6 MESI
HELICOBACTER PYLORI	61300400 KIT DI PRELIEVO FECI NOCE	KIT PRELIEVO: 975023654 KIT TRASPORTO: 926561604	ALMENO 2 SETTIMANE DALL'ULTIMA TERAPIA CON ANTIMICROBICI, INIBITORI DELLA POMPA PROTONICA E I PREPARATI FARMACOLOGICI A BASE DI BISMUTO	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 FECI	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A MERCOLEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	ANTICORPI ANTI HELICOBACTER PYLORI	DOPO 4-6 MESI
PROFILO DIMAGRIMENTO basic	61400001 KIT DI PRELIEVO SALIVARE & CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970538385 KIT TRASPORTO: 926561604	2 CAPILLARI DIGIUNO 8 ORE; 1° SALIVARE DIGIUNO 8 ORE; 2° SALIVARE DOPO ALMENO 2 ORE DA UN PASTO COPIOSO.	2 CAPILLARI LIQUIDO IL GIORNO DELLA SPED.; 1° SALIVARE AL MATTINO 6:00 - 8:00; 2° SALIVARE LA SERA 20:00 - 22:00. IL GIORNO PRIMA DELLA SPED.	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO), 2 SALIVARI	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	INSULINA; CORTISOLO MATTINA/SERA; DHEA; LEPTINA; TSH; TESTOSTERONE; PROGESTERONE; ESTRADILOLO.	DOPO 3-6 MESI

NOME DEL TEST	CODICE NATRIX KIT DI PRELIEVO	CODICE FARMADATI	PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA	ORARI DI RACCOLTA	N° E TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	T° DI CONSERVAZIONE	GIORNI DI SPEDIZIONE	CODICE NATRIX KIT TRASPORTO E MODALITÀ DI SPEDIZIONE	PARAMETRI TESTATI	RIPETIZIONE DEL TEST
PROFILO STRESS	61400001 KIT DI PRELIEVO SALIVARE & CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970538385	1° SALIVARE DIGIUNO 8 ORE; 2°, 3° E 4° SALIVARE DOPO ALMENO 2 ORE DA UN PASTO COPIOSO.	1° SALIVARE AL MATTINO 6:00 - 8:00; 2° SALIVARE A MEZZOGIORNO; 3° SALIVARE AL POMERIGGIO 16:00 - 18:00 4° SALIVARE LA SERA 20:00 - 22:00.	4 SALIVARI	T. AMBIENTE	ENTRO 3 GG* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	CORTISOLO MATTINA/MEZZOGIORNO/POMERIGGIO/SERA; DHEA MATTINO.	DOPO 3-6 MESI
PROFILO SPORT basic	61400001 KIT DI PRELIEVO SALIVARE & CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970538385	DOPO ALMENO 2 ORE DA UN PASTO COPIOSO	1° SALIVARE PRIMA DELL'ALLENAMENTO; 2° SALIVARE DOPO '30 DALLA FINE DELL'ALLENAMENTO; 3° SALIVARE DOPO '150 DALLA FINE DELL'ALLENAMENTO.	3 SALIVARI	T. AMBIENTE	ENTRO 3 GG* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	CORTISOLO BASALE/30'/150'; DHEA; TESTOSTERONE BASALE/150'.	DOPO 3-6 MESI
PROFILO DONNA FERTILE	61400001 KIT DI PRELIEVO SALIVARE & CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970538385	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	1° SALIVARE AL 6°-7° GIORNO DEL CICLO; 2° SALIVARE AL 12°-14° GIORNO DEL CICLO; 3° SALIVARE AL 20°-22° GIORNO DEL CICLO. TUTTE AL MATTINO ORE 8:00	3 SALIVARI	1° e 2° SALIVARE IN FREEZER FINO AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE; 3° SALIVARE T. AMBIENTE.	ENTRO 3 GG* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	ESTRADIOLO FASE FOLLICOLARE/FASE OVULATORIA/FASE LUTEALE; PROGESTERONE FASE FOLLICOLARE/FASE OVULATORIA/FASE LUTEALE; TESTOSTERONE.	DOPO 3-6 MESI
PROFILO DONNA MENOPAUSA	61400001 KIT DI PRELIEVO SALIVARE & CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970538385	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	1° SALIVARE AL MATTINO ORE 8:00	1 SALIVARE	T. AMBIENTE	ENTRO 3 GG* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	ESTRADIOLO; PROGESTERONE; TESTOSTERONE; ANDROSTENEDIONE.	DOPO 3-6 MESI
PROFILO UOMO	61400001 KIT DI PRELIEVO SALIVARE & CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970538385	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	1° SALIVARE AL MATTINO ORE 8:00	1 SALIVARE	T. AMBIENTE	ENTRO 3 GG* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	ESTRADIOLO; PROGESTERONE; TESTOSTERONE; ANDROSTENEDIONE.	DOPO 3-6 MESI
PROFILO BUONANOTTE	61400001 KIT DI PRELIEVO SALIVARE & CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970538385	DOPO ALMENO 2 ORE DA UN PASTO COPIOSO	1° SALIVARE LA SERA 22:00 - 24:00	1 SALIVARE	T. AMBIENTE	ENTRO 3 GG* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	CORTISOLO SERA; MELATONINA; DHEA.	DOPO 3-6 MESI
LIPIDOMIC PROFILE (L.P.)	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	NESSUNA	INDIFFERENTE	2 CAPILLARI LIQUIDO EDTA (TAPPO ROSSO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO	VALUTAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI DI MEMBRANA ERITROCITARIA E RELATIVI INDICI E RAPPORTI. *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 4 MESI
CARDIO OMEGA TEST (C.O.T.)	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	NESSUNA	INDIFFERENTE	2 CAPILLARI LIQUIDO EDTA (TAPPO ROSSO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO	VALUTAZIONE DI ALCUNI ACIDI GRASSI DI MEMBRANA CHE HANNO RILEVANZA NELL'INCIDENZA DELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI. *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 4 MESI

NOME DEL TEST	CODICE NATRIX KIT DI PRELIEVO	CODICE FARMADATI	PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA	ORARI DI RACCOLTA	N° E TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	T° DI CONSERVAZIONE	GIORNI DI SPEDIZIONE	CODICE NATRIX KIT TRASPORTO E MODALITÀ DI SPEDIZIONE	PARAMETRI TESTATI	RIPETIZIONE DEL TEST
CARDIO WELLNESS TEST (C.W.T.) basic	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO), 2 CAPILLARI LIQUIDO EDTA (TAPPO ROSSO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	COLESTEROLO TOTALE; HDL; LDL; TRIGLICERIDI; PCR; LDL-OSSIDATE; ACIDI GRASSI DI MEMBRANA. *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 6 MESI
ZONA PLUS TEST (Z.P.T.)	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	1 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO), 1 CAPILLARE LIQUIDO FLORURO EPARINA (TAPPO GIALLO), 2 CAPILLARI LIQUIDO EDTA (TAPPO ROSSO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	RAPPORTO AA/EPA; GLICEMIA; INSULINEMIA; INDICE HOMA. *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 4 MESI
METABOLIC PROFILE (M.P.) Basic	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO), 1 CAPILLARE LIQUIDO FLORURO EPARINA (TAPPO GIALLO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	LEPTINA; ADIPONECTINA; TRIGLICERIDI; INSULINA; INDICE HOMA; COLESTEROLO TOTALE; GLICEMIA; AST/ALT/GGT. *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 6 MESI
CHECK UP ASSETTO LIPIDICO	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	TG; COLESTEROLO TOTALE; HDL; LDL.	DOPO 6 MESI
CHECK UP FEGATO	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	ALT; AST; GGT; ALP; BILD; BILT; ALB.	DOPO 6 MESI
CHECK UP RENI	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	AZOTEMIA; URICEMIA; CREATININA.	DOPO 6 MESI

NOME DEL TEST	CODICE NATRIX KIT DI PRELIEVO	CODICE FARMADATI	PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA	ORARI DI RACCOLTA	N° E TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	T° DI CONSERVAZIONE	GIORNI DI SPEDIZIONE	CODICE NATRIX KIT TRASPORTO E MODALITÀ DI SPEDIZIONE	PARAMETRI TESTATI	RIPETIZIONE DEL TEST
CHECK UP TIROIDE	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO <u>ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.</u>	FT3; FT4; TSH.	DOPO 6 MESI
CHECK UP PROSTATA	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO <u>ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.</u>	PSA TOTALE.	DOPO 6 MESI
TEST GRUPPO SANGUIGNO + FATTORE RH	61100101 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970490330 KIT TRASPORTO: 926561604	NESSUNA	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARI LIQUIDO EDTA (TAPPO ROSSO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO <u>ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.</u>	GRUPPO SANGUIGNO; FATTORE RH	NO
MINERAL EVO (M.E.)	61200000 KIT DI PRELIEVO DEL CAPELLO	KIT PRELIEVO: 934623087	NO TINTE, NO COLORANTI, NO DECOLORAZIONI, NO PERMANENTI NO TRATTAMENTI CHIMICI PER ALMENO 6 SETTIMANE PRIMA DEL ESAME	INDIFFERENTE	1 BUSTA CON: 1 CIOCCA DA 1g DI CAPELLI DI DIMENSIONI PARI AL DIAMETRO DI UNA MATITA. POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE ANCHE ALTRI PELI CORPOREI ANCHE SE CON MINOR ATTENDIBILITÀ	T. AMBIENTE	DA LUNEDÌ A VENERDÌ IL CAMPIONE NON HA SCADENZA	T. AMBIENTE SCATOLINA DI CARTONCINO	39 OLIGOMINERALI SUDDIVISI IN: 23 NUTRIZIONALI, 9 TOSSICI E 7 AGGIUNTIVI.	DOPO 6 MESI
VITAMINERAL PROFILE	61200200 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 975023641 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	1 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA SEP	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO <u>ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.</u>	VITAMINA A, E, D; SODIO; CLORO; CALCIO; FOSFORO; FERRO; MAGNESIO.	DOPO 6 MESI

NOME DEL TEST	CODICE NATRIX KIT DI PRELIEVO	CODICE FARMADATI	PREPARAZIONE ALLA RACCOLTA	ORARI DI RACCOLTA	N° E TIPOLOGIA CAMPIONAMENTO	T° DI CONSERVAZIONE	GIORNI DI SPEDIZIONE	CODICE NATRIX KIT TRASPORTO E MODALITÀ DI SPEDIZIONE	PARAMETRI TESTATI	RIPETIZIONE DEL TEST
ANTI AGING PROFILE (A.A.P.)	61000001 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970722411 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	RADICALI LIBERI DELL'OSSIGENO (D-ROM TEST); CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE (BAP TEST).	DOPO 2-3 MESI
CELL SKIN PROFILE (C.S.P.)	61000001 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970722411 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	2 CAPILLARI LIQUIDO EDTA (TAPPO ROSSO), 2 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	RADICALI LIBERI DELL'OSSIGENO (D-ROM TEST); CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE (BAP TEST); ACIDI GRASSI E RELATIVI INDICI CHE HANNO RILEVANZA PER LA SALUTE DELLA PELLE. *PER EFFETTUARE IL TEST È NECESSARIO FAR COMPILARE AL PAZIENTE IL QUESTIONARIO DI ANAMNESI FORNITO DA NATRIXLAB E SEMPRE DISPONIBILE SU EASYLAB	DOPO 4 MESI
CELLULAR AGING FACTORS (C.A.F.) basic	61000001 KIT DI PRELIEVO CAPILLARE LIQUIDO	KIT PRELIEVO: 970722411 KIT TRASPORTO: 926561604	DIGIUNO ALMENO 8 ORE	PRIME ORE DEL MATTINO, <u>IL GIORNO DELLA SPEDIZIONE</u>	1 CAPILLARE LIQUIDO LITIO EPARINA (TAPPO ARANCIO), 1 CAPILLARE LIQUIDO FLORURO EPARINA (TAPPO GIALLO), 2 CAPILLARI LIQUIDO EDTA (TAPPO ROSSO)	T +2/+8 °C	IN GIORNATA* DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ	60600201 - KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO POLISTIROLO ATTENZIONE: PROCURARSI IL KIT DI TRASPORTO REFRIGERATO PRIMA DELLA VENDITA DEL TEST. PRENOTARE IL RITIRO CON ALMENO UN GIORNO D'ANTICIPO RISPETTO ALLA SPEDIZIONE DEI CAMPIONI. I CAMPIONI DEVONO ESSERE DISPONIBILI ALLA SPEDIZIONE ENTRO LE ORE 10:00 NEI GIORNI INDICATI.	RADICALI LIBERI DELL'OSSIGENO (D-ROM TEST); CAPACITÀ ANTIOSSIDANTE (BAP TEST); PCR; ACIDI GRASSI DI MEMBRANA; GLUCEMIA; INSULINEMIA; INDICE HOMA.	DOPO 4 MESI